

Bertilplatta

Förhöjnings- och träningsplatta

Bruksanvisning och produktinformation

Medicinteknisk produkt, klass I enligt MDR 2017/745



Den här informationen beskriver säker användning, rengöring och produktdata för Gula Rehab's förhöjnings- och träningsplattor. Läs igenom dokumentet före användning och spara det för framtida referens.

Produktnamn	Bertilplatta	Produktkategori	Medicinteknisk produkt, klass I
Tillverkare	Nordic Rehab AB	Dokumentversion	023
Adress	Exportgatan 73, 422 46 Hisings Backa, Sverige	Artikelnummer	5145, 5141, 5142, 5446, 5457, 5441, 5448, 5119
		Regelverk	MDR 2017/745

Produktöversikt**Avsedd användning och egenskaper****Avsedd användning**

Plattan kan användas för balans- och styrketräning, som ståplatta vid hög och sänkbart skrivbord samt som hjälpmedel vid uppresning och förflyttning. Den åttakantiga modellen kan underlätta förflyttning från rullstol.

Plattan passar för träning/användning i hemmiljö, på kliniker, i offentliga lokaler och även i övriga miljöer där en lätt, stabil och tålig tränings- eller förhöjningsplatta behövs.

- Mycket låg vikt, enkel att flytta och bära.
- Formstabil material som inte sjunker ihop vid normal användning.
- Yta med friktion och god vattentålighet.
- Varm och behaglig känsla att stå på.
- Ljuddämpande konstruktion, plattan slarvar inte.
- Tålig produkt som inte spricker vid avsedd användning.

Användning och begränsningar

<ul style="list-style-type: none"> • Placera plattan på ett plant och stabilt underlag. • Kontrollera att plattan och antihalkremsorna är hela före användning. • Anpassa träning och svårighetsgrad efter användarens förmåga. Använd stöd vid behov. • Använd inte produkten om den är skadad, sprucken eller om greppet mot underlaget är otillräckligt. • Undvik punktbelastning från exempelvis stolsben, vassa föremål eller smala klackar. Sådan belastning kan ge permanenta fördjupningar. • Vid osäkerhet kring medicinsk användning, rådgör med behörig vårdpersonal. • Allvarliga incidenter som inträffar i samband med produkten ska rapporteras till Nordic Rehab AB och till behörig myndighet. 	<p>Material: Polyetencellplast med slutna celler.</p> <p>Ovansida: Gul kantmarkering som gör plattan tydlig i användning.</p> <p>Undersida: Antihalkremsor som kan bytas ut vid behov.</p> <p>Varianter: Finns i flera storlekar och former.</p> <p>Användning: Kan användas separat eller tillsammans med andra plattor.</p>
<p>Rengöring</p> <p>Torka av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel. Vid behov kan produkten torkas av med spritlösning. Materialet har slutna celler och suger inte åt sig vatten. Låt produkten torka före användning.</p>	<p>Förvaring och underhåll</p> <p>Förvara torr och skyddat från vassa föremål och onödig punktbelastning. Byt antihalkremsor om de blir slitna eller tappar grepp. Produkten ska kasseras om den är skadad på ett sätt som påverkar säker användning.</p>

Märkning och spårbarhet

Index av symboler

	<p>Tillverkare Nordic Rehab AB, Exportgatan 73, 422 46 Hisings Backa, Sverige</p>		<p>Tillverkningsdatum 2025 11</p>
	<p>Lotnummer 023</p>		<p>Artikelnummer 5145, 5141, 5142, 5446, 5457, 5441, 5448, 5119</p>
	<p>Se bruksanvisningen Läs detta dokument före användning och spara det för framtida referens.</p>		<p>Medicinteknisk produkt Produkten är en medicinteknisk produkt, klass I.</p>
	<p>CE märkning Produkten är CE märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen, MDR 2017/745.</p>		

CE försäkran: Produkten är CE märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen, MDR 2017/745.

<p>Nordic Rehab AB / Gula Rehab Exportgatan 73 422 46 Hisings Backa Sverige</p>	<p>Dokumentinformation Dokumentversion: 002 Utfärdat: 2023-11-23 Regelverk: MDR 2017/745</p>
--	---